




## Kasutusjuhised.

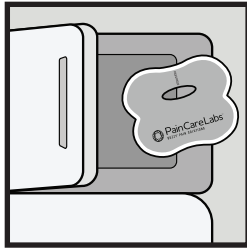

### Aseta jääkotid („tiivad“) sügavkülmikusse.


Hoidke jääpatju sügavkülmas ligikaudu üks tund, kuni need on täielikult läbi külmunud. Eemaldage vahetult enne kasutamist. Jääpadjad püsivad külmununa toatemperatuuril umbes 15 minutit ja naha vastas umbes 5 minutit. (Ärge külmutage vibratsiooniüksust.) Paigaldage tiivad nii, et ava asetseks horisontaalselt konksul või

silikoonrihma all. Ärge paigaldage ava ega tiibu vertikaalselt, sest ava võib rebeneda või rihm puruneda. Buzzy® Healthcare'i jääpatjade toime on mõlemal poolel sama intensiivne. intensiivne valge pool külmaturundlikele patsientidele. Ühele patsiendile mõeldud jääpadja tiibadel (müügil eraldi) on külmaturundlike patsientide jaoks vähem intensiivse toimega valge pool. Jääpadjad ei sisalda etüleenglükooli („antifriisi“). Jääpadjas olev geel võib mittenõuetekohase hoiustamise korral rikneda ning aja jooksul või kuivas kliimas kuivada. Parima toime saavutamiseks peavad jääpadjad olema täielikult läbi külmunud, et edastada vibratsiooni õigel sagedusel ja tugevusel. (Külmutamata padjad või geel neelavad valu leevendamiseks vajaliku spetsiifilise sageduse.)


**Märkus.** Jääpadjas olev geel võib mittenõuetekohase hoiustamise korral rikneda ning aja jooksul või kuivas kliimas kuivada (müügil eraldi), et säilitada külmunud temperatuur.

**Eraldi müügil olevad tarvikud:** infektsioonikontrolli kotid, Cold2Go soojustatud transpordikotid, preemiakleebised ja palju muud.

3

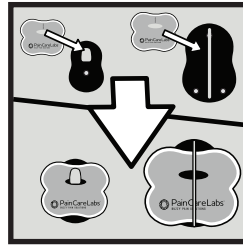

**Kinnitage tiivad Buzzy® Healthcare tagaküljele.**

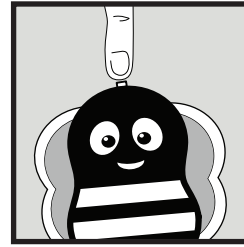

**Aktiveerimiseks lülitage seade lülitist sisse või vajutage tugevalt nuppu.**

### Buzzy® Healthcare leevendab valu kokkupuutel.

Asetage otse vigastuse kohale või nõelaprotseduuride puhul „aju ja valu vahele“.


#### Kas soovite rohkem teavet?

Rohkem juhiseid, videoid ja muid allalaaditavaid materjale leiate aadressilt [bzy.fyi](http://bzy.fyi)




4

## Buzzy® paigutus.

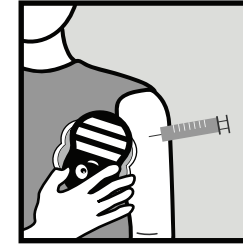

Deltalihase süst

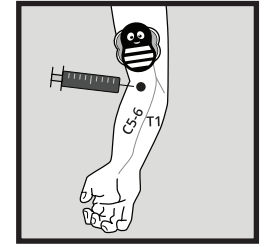

Veenitee paigaldamiseks ja flebotoomiaks

### Süstide jaoks.

Asetage Buzzy® otse süstekohale 30 sekundiks või kuni kaheks minutiks, kui süstitava ravimi kogus on üle 1 ml või ravim põhjustab tugevamat põletustunnet. Liigutage Buzzy®-t proksimaalselt (pea või selgroo suunas). Süstige samasse dermatoomi nii, et täpp jääks süstekoha lähedale. Deltalihase süstide puhul suruge seade vastu kaenlaalust nii, et täpp oleks suunatud õla poole, et aktiveerida mitu ümbritsevat dermatoomi.

### Veenisestest süstide või flebotoomia jaoks.

Lülitage vibratsioon lülitist sisse. Hoidke seadet käes, kinnitage see rihmaga või asetage Buzzy Healthcare žguti alla 2–3 cm punktisioonikohast proksimaalsemale (kehataüve poole). Ärge asetage otse punktisioonikohale. Puhastage punktisioonikoht ja tehke punktisioon kohe. Valikuline: tõmmake žgutt läbi Buzzy® Healthcare'i pilu, et kinnitada Buzzy® Healthcare käsivarre külge.

5

## Patareid

Seade töötab kahe (2) AAA leelispatareiga (IEC kood: LR03). Vahetage patareid, kui vibratsioon nõrgeneb või lakkab (~20 kasutustundi). Seade on sertifitseeritud 3 patareivahetuse jaoks. Vahetage alati mõlemad patareid korraga ning ärge kasutage koos uusi ja kasutatud patareid ega erinevate kaubamärkide või eri tüüpi patareid. Kui seadet ei kasutata pikemat aega, eemaldage patareid, et vältida nende lekkimist ja tühenemist.

### Patareide vahetamine

Lülitage seade välja. Keerake tagapaneeli kruvid ristpeaga kruvikeerajaga lahti ja eemaldage paneel. Sisestage uued patareid seadmel näidatud polaarsuse (+/-) järgi. Paigaldage tagapaneel tagasi ja kruvige kinni.


**Märkus.** Ärge keerake kruvisid liiga tugevalt kinni.

### Patereide utiliseerimine

Enne seadme utiliseerimist eemaldage patareid. Kõrvaldage patareid olmejäätmetest eraldi vastavalt kohalikele leelispatareide (LR03) ringlussevõtu- ja keskkonnanouetele. Seadme kõrvaldamisel järgige elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) käitlemise juhiseid. Ärge põletage patareid ega seadet.

### Patarei ohutus

- Kasutage ainult AAA leelispatareid (LR03).
- Ärge laadige mittelaetavaid patareid.
- Ärge lühistage, muljuge, torgake ega võtke patareid lahti ning ärge jätke neid kuumuse, tule ega vee kätte.
- Hoidke patareid lastele kättesaamatus kohas.
- Allaneelamise korral pöörduge viivitamatult arsti poole.

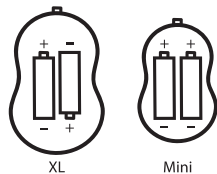

6

### Kui märkate patareidest lekkimist, korrosiooni või lõhna:

- ärge puudutage lekkinud ainet palja nahaga;
- kasutage kaitsekindaid ja pühkige pesa kuiva lapiga;
- utiliseerige patareid viivitamatult vastavalt kohalikele nõuetele.
- Kui lekkinud aine satub nahale või silma, loputage rohke veega ja pöörduge ärrituse püsimisel arsti poole.

Enne uute patareide sisestamist kontrollige, ega seadmel pole kahjustusi. Kui korrosioon ei kao või seade ei tööta korralikult, lõpetage kasutamine ja pöörduge klientide poole.

### FCC standarditele vastavus

- See seade vastab FCC eeskirjade 15. osale. Seadme kasutamise suhtes kehtivad järgmised kaks tingimust: (1) see seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ning (2) see seade peab taluma mis tahes vastuvõetud häireid, sealhulgas häireid, mis võivad põhjustada soovimatut talitlust.
- "Palun pange tähele, et selle toote muudatused, mida vastavuse eest vastutav osapool ei ole selgesõnaliselt heaks kiitnud, võivad tühistada kasutaja õiguse seadet kasutada."
- MÄRKUS: seda seadet on testitud ja leitud, et see vastab B-Massi digitaalsete seadmete piirnormidele vastavalt FCC eeskirjade 15. osale. Need piirnormid on kavandatud pakkuma mõistlikku kaitset kahjulike häirete eest elamupiirkonna paigalduses. Seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning kui seda ei paigaldata ja kasutata vastavalt juhistele, võib see põhjustada kahjulikke häireid raadiosides. Siiski ei ole tagatud, et konkreetses paigalduses häireid ei esine. Kui seade põhjustab kahjulikke häireid raadio- või televisiooni vastuvõtule, mida saab kindlaks teha seadme välja- ja sisselülitamisega, soovatakse kasutajal proovida häiret kõrvaldada ühe või mitme järgmise meetme abil: • suunake vastuvõtuantenn ümber või paigutage see mujale; • suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust; • ühendage seade pistikupessa, mis asub vastuvõtja omast erinevas vooluringis; • Pöörduge abi saamiseks edasimüüja või kogenud raadio-telerimehaaniku poole.
- Pain Care Labs, 195 Arizona Ave. LW08 NE Atlanta GA 30307 • 877-805-2899 (Pain Care Labs vastutab osapool USA-s)

## Sümbolid ja ikoonid.

|  |                                          |  |                                  |
|--|------------------------------------------|--|----------------------------------|
|  | Ühel patsiendil korduvalt kasutatav      |  | Hoiatus                          |
|  | Hoida päikesevalguse eest kaitstult      |  | Tootja                           |
|  | Hoida kuivas                             |  | Tootjariik                       |
|  | Temperatuuripiirangud                    |  | Tootmiskuupäev                   |
|  | Niiskuspierangud                         |  | Partii number                    |
|  | Rõhupiirangud                            |  | Seadme unikaalne identifikaator  |
|  | Euroopa vastavus                         |  | Meditisiniseade                  |
|  | Patarei eemaldamine                      |  | Euroopa Liidu volitatud esindaja |
|  | Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed |  | Vastab FCC standarditele         |
|  | Enne kasutamist tutvuge kasutusjuhendiga |  | B-tüüpi rakendusosa              |
|  | Tõlked                                   |  |                                  |

7

8