





Instrucciones de uso:

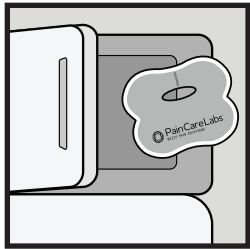


Coloque las bolsas de hielo ("alas") en el congelador.
Guarde las compresas de hielo en un congelador durante aproximadamente una hora hasta que estén sólidos. Retírelos justo antes de usarlos. Las compresas de hielo permanecerán congeladas durante aproximadamente 15 minutos a temperatura ambiente y 5 minutos en contacto con la piel. (No congele la unidad de vibración). Las alas encajan con el orificio

colocado en posición horizontal en el gancho, o en posición horizontal bajo la banda de silicona. No oriente el orificio/alas en posición vertical, ya que el orificio podría rasgarse o la banda podría romperse. Las compresas de hielo de Buzzy® Healthcare tienen la misma intensidad en ambos lados. Las alas de las compresas de hielo para un solo paciente (se venden por separado) tienen un lado blanco de menor intensidad para pacientes sensibles al frío. Las compresas de hielo no contienen etilenglicol ("anticongelante"). El gel dentro del hielo puede deteriorarse si no se almacena correctamente y se deshidrataará con el tiempo o en climas secos. Para lograr el mejor efecto, las compresas de hielo deben estar completamente congeladas para transmitir la vibración a la frecuencia e intensidad efectivas. (Las compresas o los geles no congelados absorberán la frecuencia específica necesaria para el alivio del dolor).
Nota: para el transporte, coloque las compresas entre dos compresas de frío comerciales o dentro de la bolsa Cold2Go (se vende por separado) para mantenerlas congeladas.
Accesorios que se venden por separado: bolsas para control de infecciones, bolsas aislantes Cold2Go para transporte, calcomanías de recompensa y otros.

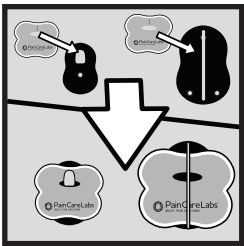

Sujete las alas en la parte posterior de Buzzy® Healthcare.

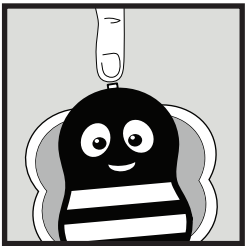

Accione firmemente el interruptor o presione el botón para activar.

Buzzy® Healthcare controla el dolor al contacto.
Colóquelo directamente sobre la lesión o "entre el cerebro y el dolor" en los procedimientos con agujas.

¿Desea obtener más información?


Más información práctica, videos y otros recursos descargables están disponibles en bzy.fyi



Colocación de Buzzy®:



Inyección deltoidea

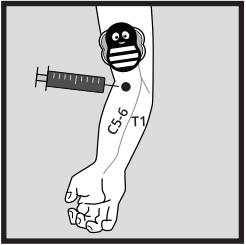

Vía intravenosa y flebotomía

Para inyecciones:
Con las alas de hielo colocadas, active la vibración. Coloque Buzzy® directamente sobre el sitio de inyección durante 30 segundos, o hasta 2 minutos para volúmenes mayores a 1 cc/medicamentos con mayor ardor. Mueva Buzzy® proximalmente (hacia la cabeza o la columna). Inyecte en el mismo dermatoma, con el punto cerca del sitio de inyección. Para inyecciones deltoideas, presione contra la axila con el punto orientado hacia el hombro para activar múltiples dermatomas circundantes.
Para vías intravenosas o flebotomía:
Active el interruptor de vibración. Sujete, asegure con la correa, o coloque Buzzy Healthcare bajo el torniquete 2-3 cm por encima (proximal) del sitio de acceso. No lo coloque directamente sobre el sitio. Limpie el sitio y realice el acceso sin demora.
Opcional: pase el torniquete a través de la ranura de Buzzy® Healthcare para asegurar Buzzy® Healthcare al brazo.

Baterías

Este dispositivo funciona con dos (2) baterías alcalinas AAA (código IEC: LR03). Reemplace las baterías cuando la vibración se debilite o se detenga (aproximadamente 20 horas de uso). El dispositivo está certificado para 3 cambios de batería. Siempre reemplace ambas baterías al mismo tiempo y no mezcle baterías nuevas y usadas, ni baterías de diferentes marcas o tipos. Si el dispositivo no se va a usar durante un período prolongado, retire las baterías para evitar fugas y el agotamiento de la batería.

Reemplazo de las baterías


Comience con el dispositivo apagado. Para reemplazar las baterías AAA, desatornille con un destornillador Phillips y abra el panel trasero, colocando las baterías nuevas con la polaridad correcta (+/-) como se muestra en el dispositivo. Vuelva a colocar el panel trasero y atornille.
Nota: no apriete los tornillos en exceso.

Eliminación de las baterías

Retire las baterías antes de desechar el dispositivo. Deseche las baterías por separado de los residuos domésticos, de acuerdo con la normativa local de reciclaje y medio ambiente para baterías alcalinas (LR03). Siga las pautas de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) al desechar el dispositivo. No incinere las baterías ni el dispositivo.

Battery Safety

- Use solo baterías alcalinas AAA (LR03).
- No recargue baterías no recargables.
- No provoque cortocircuitos, aplaste, perforo, desarme ni exponga las baterías al calor, fuego o agua.
- Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños. Si se ingieren, busque atención médica de inmediato.

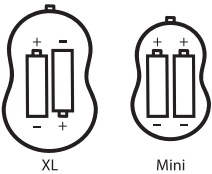

- ⚠ Si observa fugas, corrosión u olor en las baterías:**
1. No toque el material derramado directamente con la piel.
 2. Use guantes protectores y limpie el compartimento con un paño seco.
 3. Deseche las baterías de inmediato conforme a la normativa local.
 4. Si el material derramado entra en contacto con la piel o los ojos, enjuague con abundante agua y busque atención médica si la irritación persiste.
- ⚠ Verifique que no haya daños antes de volver a insertar baterías nuevas. Si persiste la corrosión o el dispositivo funciona mal, suspenda su uso y contacte con el servicio de atención al cliente.**

Cumplimiento de las normas de la FCC

1. Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.
2. "Tenga en cuenta que los cambios o modificaciones de este producto no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo".
3. NOTA: este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, conforme a la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas: • Reorientar o reubicar la antena receptora. • Aumentar la separación entre el equipo y el receptor. • Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor. • Consultar al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.
4. Pain Care Labs, 195 Arizona Ave. LW08 NE Atlanta GA 30307 • 877-805-2899 (Pain Care Labs, parte responsable en los EE. UU.)

Símbolos e íconos:

	Un solo paciente - Uso múltiple		Advertencia
	Mantener alejado de la luz solar		Fabricante
	Mantener seco		País de fabricación
	Límites de temperatura		Fecha de fabricación
	Límites de humedad		Número de lote
	Límites de presión		Identificador único de dispositivo
	Conformidad Europea		Dispositivo médico
	Extracción de las baterías		Representante en la Unión Europea
	Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos		Cumple con las normas de la FCC
	Consulte las instrucciones antes de usar		Parte aplicada al tipo B
	Traducciones		