


Bruksanvisning:

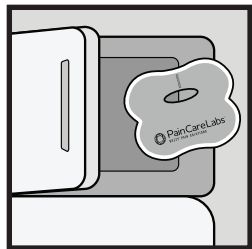


Lägg kylkuddarna ("vingarna") i frysen.

Förvara kylpåsarna i en frys i cirka en timme tills de är helt frusna. Ta ut dem precis innan användning. Kylpåsarna förblir frysta i cirka 15 minuter i rumstemperatur och 5 minuter mot huden (frys inte vibrationsenheten). Vingarna fästs genom att placera hålet horisontellt på kroken, eller


horisontellt under silikonbandet. Rikta inte hålet/vingarna vertikalt, eftersom hålet då kan gå sönder eller bandet kan gå av. Buzzy® Healthcare-kylpås har samma kyleffekt på båda sidor. Vingar för enpatientsbruk (säljs separat) har en mindre vit sida med mildare kyleffekt för köldkänsliga patienter. Kylpåsarna innehåller inte etylenglykol ("frostsnyddsmiddel"). Gelen inuti kan försämrats om den inte förvaras korrekt och kan uttorkas med tiden eller i torra klimat. För bästa effekt måste kylpåsarna vara helt frusna för att överföra vibration med rätt frekvens och styrka (ofrysna kylpåsar eller geler absorberar den specifika frekvens som behövs för smärtlindring). **Obs!** Vid transport, placera mellan två vanliga kylklampar eller inuti en Cold2Go-väska (säljs separat) för att bibehålla den frysta temperaturen.

Tillbehör som säljs separat: infektionskontrollpåsar, isolerade Cold2Go-väskor för transport, belöningsskilmärken med mera.

3

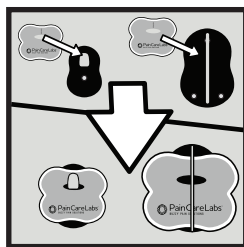

Fäst vingarna på baksidan av Buzzy® Healthcare.

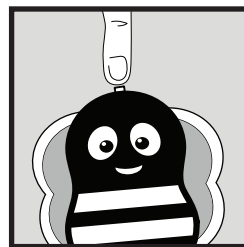

Slå på strömbrytaren eller tryck bestämt på knappen för att aktivera.

Buzzy® Healthcare lindrar smärta vid kontakt.

Placera direkt på skadan eller "mellan hjärnan och smärtan" vid nålstick.


Vill du ha mer information?

Mer information om hur produkten används, videor och andra nedladdningar finns på bzy.fyi




4

Placering av Buzzy®:

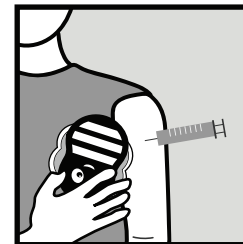

Deltoidinjektion

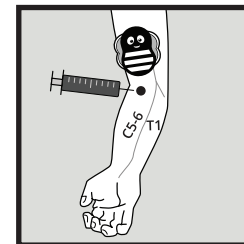

IV och venprovtagning

För injektioner:

Med isvingarna på plats, aktivera vibrationen. Placera Buzzy® direkt på injektionsstället i 30 sekunder, eller upp till 2 minuter för >1 ml/läkemedel som svider mer. Flytta Buzzy® proximalt (mot huvudet eller ryggraden). Injicera i samma dermatom, med punkten nära injektionsstället. Vid deltoidinjektioner, tryck mot armhålan med punkten riktad mot axeln för att aktivera flera omgivande dermatom.

För IV eller venprovtagning:

Aktivera vippströmbrytaren för vibration. Håll fast, säkra med band, eller placera Buzzy Healthcare under stasbandet 2-3 cm ovanför (proximalt om) insticksstället. Placera inte direkt på stället. Rengör stället och utför insticket direkt. Valfritt: För stasbandet genom öppningen på Buzzy® Healthcare för att fästa Buzzy® Healthcare på armen.

5

Batterier

Denna produkt drivs av två (2) alkaliska AAA-batterier (IEC-kod: LR03). Byt batterierna när vibrationen blir svag eller upphör (cirka 20 timmars användning). Produkten är certifierad för 3 batteriömsbyten. Byt alltid ut båda batterierna samtidigt och blanda inte nya och använda batterier eller batterier med olika märken eller typer. Om produkten inte ska användas under en längre tid, ta ur batterierna för att förhindra läckage och batteriurladdning.

Byte av batterier


Se till att enheten är avstängd. För att byta AAA-batterier, skruva upp med en stjärnskruvmejsel och öppna bakpanelen, placera de nya batterierna med rätt polaritet (+/-) enligt markeringen i produkten. Sätt tillbaka bakpanelen och skruva fast den igen. **Obs!** Dra inte åt skruvarna för hårt.

Kassering av batterier

Ta ur batterierna innan produkten kasseras. Kassera batterierna separat från hushållsavfall i enlighet med lokala återvinnings- och miljöföreskrifter för alkaliska (LR03) batterier. Följ riktlinjerna för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) vid kassering av produkten. Bränn inte batterierna eller produkten.

Batterisäkerhet

- Använd endast alkaliska AAA-batterier (LR03).
- Ladda inte icke-uppladdningsbara batterier.
- Batterierna får inte kortslutas, krossas, punkteras, plockas isär eller utsättas för värme, eld eller vatten.
- Förvara batterier utom räckhåll för barn.
- Vid förtäring, sök omedelbar läkarvård.
- Sätt tillbaka batteriluckan ordentligt innan produkten används igen.

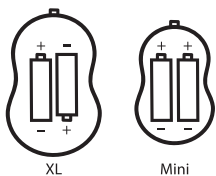

6



Om du upptäcker läckage, korrosion eller lukt från batterierna:



- Vidrör inte läckt material med bara händer.
- Använd skyddshandskar och torka ur facket med en torr trasa.
- Kassera batterierna omedelbart enligt lokala föreskrifter.
- Om läckt material kommer i kontakt med hud eller ögon, skölj noggrant med vatten och sök läkarvård om irriterationen kvarstår.



Kontrollera att det inte finns skador innan nya batterier sätts i. Om korrosion kvarstår eller produkten inte fungerar som den ska, sluta använda den och kontakta kundtjänst.

Överensstämmelse med FCC-standarder

- Denna produkt uppfyller kraven i FCC-reglerna, del 15. Användningen är föremål för följande två villkor: (1) denna produkt får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna produkt måste acceptera all mottagen störning, inklusive störning som kan orsaka oönskad drift.
- "Observera att ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänns av den part som ansvarar för överensstämmelse kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen."
- Obs! Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränsvärdena för en digital enhet av klass B, enligt del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränsvärden är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostadsmiljö. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med anvisningarna, orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kan uppstå i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och sätta på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder: • Rikta om eller flytta mottagarantennen. • Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren. • Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till. • Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/tv-tekniker för hjälp.
- Pain Care Labs, 195 Arizona Ave. LW08 NE Atlanta GA 30307 • +1 877 805 2899 (Pain Care Labs ansvarig part i USA.)

Symbols & Icons:



Enpatient – flergångsbruk



Skyddas från solljus



Hålls torr



Temperaturgränser



Fuktighetsgränser



Tryckgränser



CE-märkning



Borttagning av batteri



Avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter



Läs bruksanvisningen före användning



Översättningar



Varning



Tillverkare



Tillverkningsland



Tillverkningsdatum



Partinummer



Unik produktidentifierare



Medicinteknisk produkt



EU-representant



Uppfyller FCC-standarder



Patientansluten del av typ B

7

8