



Buzzy®

« DRUG FREE PAIN RELIEF »

Buzzy® Personal er et personlig forbrukerprodukt beregnet for bruk av én enkelt bruker eller i hjemmebaserte helsetjenester av en ikke-profesjonell bruker.

Model	REF	GTIN
Buzzy Personal Striped	BKT1	00856921003411
Buzzy Personal Black	BKT2	00856921003473
Buzzy Personal LadyBuzzy	BKT3	00856921003459



MMJ Labs, LLC dba Pain Care Labs
195 Arizona Ave NE LW08 • Atlanta, GA 30307, U.S.A.
PainCareLabs.com • Info@PainCareLabs.com
877.805.2899


IFU-002 Rev 04 Buzzy® Personal Bruksanvisning
07.29.2026

PainCareLabs.com



PainCareLabs™

Bruksveiledning:

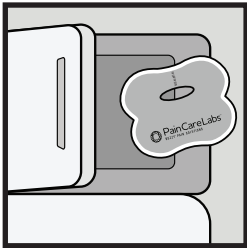

Legg kuldeputene ("vinger") i fryseren.

Oppbevar kuldeputene i fryseren i omtrent én time til de er helt gjennomfrosne. Ta dem ut rett før bruk. Kuldeputene holder seg frosne i omtrent 15 minutter ved romtemperatur og 5 minutter mot huden. (Vibrasjonsenheten skal ikke fryses.) Vingene passer horisontalt under silikonbåndet. Ikke plasser hull/vinger vertikalt, da båndet kan ryke. Buzzy® Personal kuldeputer har en klar side for mer intens kulde og en mindre intens hvit side for kuldefølsomme brukere. Kuldeputene inneholder ikke etylenglykol («frostvæske»).

Gelen inni kan forringes hvis den ikke oppbevares riktig, og vil dehydreres over tid eller i tørt klima. For best effekt må kuldeputene være helt gjennomfrosne for å overføre vibrasjon med riktig frekvens og styrke. (Utfrosne puter eller geler vil absorbere den spesifikke frekvensen som trengs for smertelindring.)
Merk: Ved transport plasseres kuldeputen mellom to kommersielle kjøleelementer eller inni en Cold2Go-bag (selges separat) for å opprettholde frosset temperatur.
Tilbehør som selges separat: Cold2Go isolerte transportbager, DistrACTION®-kort, belønningsklistermerker og mer.

Vil du vite mer?

Mer informasjon om bruk, plassering, videoer og annet nedlastbart materiale finner du på bzy.fyi





PHYSICIAN INVENTED

Miljøforhold:

Transport og oppbevaring mellom bruk:
-25 til 70 °C. 0–95 % RF. 700–1060 hPa.

Driftsforhold:

5–40 °C. 15–95 % RF. 700–1060 hPa.
2000 moh.



CS Lifesciences Europe Limited
The Black Church, St. Mary's Place
Dublin 7, D07 P4AX, Ireland



Type B, anvendt del

Batterier

Denne enheten drives av to (2) AAA alkaliske batterier (IEC-kode: LR03). Bytt batteriene når vibrasjonen blir svak eller stopper (etter ca. 20 timers bruk). Enheten er sertifisert for 3 batteribytter. Bytt alltid begge batteriene samtidig, og ikke bland nye og brukte batterier eller batterier av ulike merker eller typer. Hvis enheten ikke skal brukes over lengre tid, ta ut batteriene for å forhindre lekkasje og utlading.

Bytte av batterier

Start med enheten avslått. For å bytte AAA-batterier, skru opp med en stjerneskrutrekker og åpne bakpanelet. Sett inn nye batterier med riktig polaritet (+/-) som vist på enheten. Sett bakpanelet på plass igjen og skru fast.
Merk: Ikke stram skruene for hardt.

Buzzy® Personal inneholder:

Buzzy® Personal-sett inkluderer en M-Stim® motorenhet (holdbar terapeutisk vibrasjonsmotorenhet) med vippebryter for manuell avstenging (2 AAA-batterier installert), to kuldeputer, én håndfri stropp og bruksanvisning. Alt tilbehør er lateksfritt og gjenbrukbart. Kuldeputer og stropper er personlige forbrukerprodukter beregnet for bruk av én enkelt bruker.

Garanti:


Hvis du ikke er helt fornøyd, kan du returnere produktet til kjøpsstedet innen 30 dager for full refusjon, eller kontakte oss på Support@PainCareLabs.com. For mer informasjon om returprosessen, besøk PainCareLabs.com/Warranty-and>Returns/.

⚠ Advarsler:


Kun til tiltenkt bruk. • Direkte eller langvarig bruk av is kan forårsake vasokonstriksjon (sammmentrekning av blodårer).

Garanti:

Selskapet dekker enhver type feil eller defekt som kan oppstå ved normal bruk av produktets motorenhet, i 6 måneder eller 3 batteribytter, avhengig av hva som inntreffer først. Garantien for tekstiltilbehør og kuldeputer varer i 1 år fra kjøpsdato. Selskapet vil erstatte produktet ditt eller refundere kjøpet, og forbeholder seg retten til å oppgradere eller erstatte deler med de nyeste produktversjonene. Buzzy Personal-enheter har et silikonbånd for enkel festing av vingene. Skader på båndet som skyldes bruk av kuldeputer som ikke er av Buzzy-merket, feil plassering av kuldeputer, hardhendt behandling eller feil bruk av produktet, dekkes ikke av garantien. Enheter med utladede batterier og/eller returnerte enheter som fungerer ved inspeksjon, utgjør ikke en feil og dekkes ikke av garantien. Enheter med utslitte skruer dekkes ikke av garantien. Returnerte enheter som ikke dekkes av garantien, kan returneres for kundens egen regning. **Helseinstitusjoner som kjøper Buzzy Personal-sett til klinisk bruk, mister enhver garanti for institusjonen.** Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, og du kan også ha andre rettigheter som kan variere fra delstat til delstat.

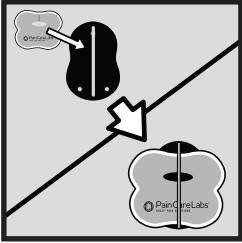

Fest vingene på baksiden av Buzzy®.

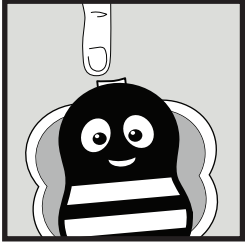

Vipp bryteren for å aktivere.

☐ ON ☒ OFF

Symboler og ikoner:

	Én pasient – flergangsbruk		Advarsel
	Holdes unna sollys		Produsent
	Holdes tørt		Produksjonsland
	Øvre og nedre temperaturgrense		Produksjonsdato
	Øvre og nedre fuktighetsgrense		Partinummer
	Øvre og nedre trykkgrense		Unik enhetsidentifikator
	Europeisk samsvar (CE)		Medisinsk utstyr
	Fjern batteriet før kassering		EU-representant
	Kasserte elektriske og elektroniske produkter (WEEE)		Oppfyller FCC-standarder
	Se bruksanvisningen før bruk		Type B, anvendt del
	Oversettelser		

 Kassering av batterier

Ta ut batteriene før enheten kasseres. Kasser batteriene atskilt fra husholdningsavfall, i samsvar med lokale gjenvinnings- og miljøforskrifter for alkaliske (LR03) batterier. Følg WEEE-retningslinjene (kasserte elektriske og elektroniske produkter) ved kassering av enheten. Batteriene eller enheten skal ikke brennes.

⚠ Batterisikkerhet

- Bruk kun AAA alkaliske (LR03) batterier.
- Ikke lad opp batterier som ikke er oppladbare.
- Ikke kortslutt, knus, punkter, demonter eller utsett batteriene for varme, ild eller vann.
- Oppbevar batteriene utilgjengelig for barn. Ved svelging, søk øyeblikkelig legehjelp.
- Sett batteridekselet godt på plass før enheten tas i bruk igjen.

Indikasjoner for bruk:

Buzzy® er beregnet for å kontrollere smerte forbundet med nålebaserte prosedyrer (f.eks. injeksjoner, vaskulær tilgang, kanylering, blodprøvetaking, blodgivning, dialyse, kosmetiske og dentale injeksjoner), samt midlertidig lindring av mindre skader (muskel- eller seneverk, flis i huden og vepse-/biestikk). Bruk med kuldeputer er godkjent fra 1 års alder.

⚠ Kontraindikasjoner:

Skal ikke brukes ved uforklarlig leggsmerter. Rådfør deg med lege. • Denne enheten skal ikke brukes over hovne eller betente områder eller hudutslett. • Skal ikke plasseres direkte på en varmeskade (brannskade). • Ikke bruk kuldepute ved underliggende overfølsomhet for is eller kulde (f.eks. sigdcelleanemi, Raynauds sykdom).

⚠ Forsiktighetsregler:

Oppbevar kuldeputer på et kjølig, tørt sted. • Kuldeputene må være helt gjennomfrosne for best effekt. • Ikke bruk tørris til å fryse kuldeputer med mindre dette overvåkes av helsepersonell. • Ikke stikk hull på kuldeputenes kamre. • Kastes ved lekkasje. • Skal ikke svelges (gel). • Oppbevares utilgjengelig for barn og kjæledyr. • Skal ikke brukes ved nevropati eller overfølsomhet for kulde.

Feilsøking:

Ved mye bruk eller ekstreme temperatursvingninger kan det være nødvendig å bytte batterier oftere. Hvis enheten slutter å fungere eller gir svak mekanisk stimulering, bytt batteriene. Sett inn nye batterier med riktig polaritet (+/-) som vist på enheten.


Vedlikehold:

Kontroller hele enheten for synlige tegn på skade, som sprekker. Sørg for at bryteren beveger seg fritt. Kontroller at myr skru(e) sitter godt fast. Tørk forsiktig av alle eksponerte overflater med en myk klut fuktet med en mild såpeløsning. For desinfeksjon, tørk av alle eksponerte overflater med alkohol eller en sykehusgodkjent desinfeksjonsserviett. Klorheksidin kan bryte ned plast over tid. PDI Sani-Cloth desinfeksjonsservietter (de med gult lokk) anbefales. Det er ideelt å la enheten lufttørke før bruk. Den klare siden av vingene kan også tørkes av med en alkoholserviett eller -pinne. La lufttørke. Skal ikke autoklaveres eller nedsenkes i væske. Denne enheten krever ikke sterilisering for bruk.

Buzzy® plassering:



Deltoid-injeksjon

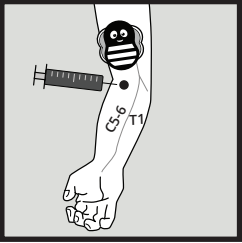

IV og blodprøvetaking

Med kuldevingene på plass, aktiver vibrasjon.

Buzzy® Personal kontrollerer smerte ved kontakt.

Plasseres direkte på skaden, eller “mellom hjernen og smerten” ved nålebaserte prosedyrer.

Ved injeksjoner:

Ved intramuskulære deltoid-injeksjoner, press mot aksillen (mellom skulder og armhule) med prikken vendt mot skulderen.
Ved andre injeksjoner, plasser Buzzy® direkte på injeksjonsstedet i 30–60 sekunder. Flytt Buzzy® mot hodet eller ryggraden (proksimalt). Injiser med prikken nær injeksjonsstedet.

Ved IV eller blodprøvetaking:

Aktiver vippebryteren for vibrasjon. Hold på plass, fest med stroppen, eller plasser Buzzy Personal under mansjetten/stasebåndet 2–3 cm over (proksimalt for) innstikkstedet. Skal ikke plasseres direkte på stedet. Rengjør stedet og utfør innstikket uten forsikelse. Valgfritt: Før stasebåndet gjennom sporet på Buzzy® Personal for å feste Buzzy® Personal til armen.

Retur av enhet:

Kjøperen må kontakte kundeservice eller den autoriserte distributøren i landet der enheten ble kjøpt, for returinstruksjoner.

Bestilling / Tilleggsinformasjon:

Besøk nettstedet vårt PainCareLabs.com for en fullstendig liste over ofte stilte spørsmål, andre tips om smertehåndtering, instruksjonsvideoer, tilbehør og reservedeler.



MÅ IKKE VEDLIKEHOLDES UNDER BRUK

US-patentert Britisk patentnr. 2455695
RM-1910, 1248-064-5002-00, 1248-064-5001-00

⚠ Hvis du oppdager lekkasje, korrosjon eller lukt fra batteriene:

1. Ikke berør lekket materiale med bar hud.
2. Bruk vernehansker og tørk av batterirommet med en tørr klut.
3. Kasser batteriene umiddelbart i henhold til lokale krav.
4. Hvis lekket materiale kommer i kontakt med hud eller øyne, skyll grundig med vann og søk legehjelp hvis irritasjonen vedvarer.

⚠ Kontroller for skader før nye batterier settes inn. Hvis korrosjon fortsatt er til stede, eller enheten ikke fungerer som den skal, avslutt bruken og kontakt kundestøtte.

